

Rendelési információk:

Katalógusszám Kiszerezés
31001 1 x 2 ml

Felhasználás:

Összantioxidáns kapacitás (TAOC) reagens kalibrálására szolgáló liofilizált
összantioxidáns kapacitás (TAOC) standard.

A liofilizátumot tartalmazó üvegben vákuum van, ezért az üveget az anyagvesztés
elkerülése érdekében óvatosan nyissa ki. Beoldáskor mérjen az üvegbe pipettával pontosan
2 ml desztillált vizet.

A standard koncentrációja LOT specifikus.

Visszavezethetőség:

Belső standard.
TEAC = Trolox ekvivalens antioxidáns kapacitás






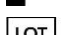

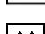

Stabilitás:

Beoldás nélkül 2-8°C-on tárolva a lejáratí időig.
Beoldás után 2-8°C-on tárolva 2 napig, -20°C-on tárolva
6 hónapig.

Figyelmeztetések:

Csak in vitro diagnosztikai célokra használható.
Ne használja a standardet a lejáratí dátum eltelte után!

A címkéken a következő szimbólumok lehetnek

	In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
	Gyártó
	CE-jelölés
	Tárolási hőmérséklet
	Lejáratí idő (év/hónap)
	Gyártási szám
	Kódszám
	Tárolási irány
	Biológiai veszély

Ordering information:

Catalogue number Size
31001 1 x 2 ml

Preparation:

Total antioxidant capacity (TAOC) standard for the calibration of total antioxidant capacity
(TAOC) reagent.

The lyophilisate is vacuum sealed, therefore the vial should be opened very carefully to
avoid loss of dried material. For reconstitution add with a pipette exactly 2 ml of distilled
water.

Concentration is LOT specific.

Traceability:

Internal standard.
TEAC = Trolox equivalent antioxidant capacity







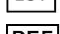
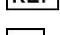

Stability:

Without reconstitution at 2-8°C until the expiry date.
After reconstitution at 2-8°C 2 days, at -20°C six month.

Warnings:

For in vitro diagnostic use only.
Do not use after the expiry date!

The following symbols can be used on the labels

	In vitro diagnostic device
	Manufacturer
	CE-marking
	Temperature limitations
	Use by (year/month)
	Batch code
	Catalogue number
	This way up
	Biological risk