

### Alkaline washing solution for TMS series

#### Material Supplied

One bottle, 500 ml of a 50x concentrate.

#### Intended Use

Dilute to 2% for use.  
For 1000 ml add 20 ml Fast Detergent 1 to 980 ml distilled or deionized water, and mix by gentle inversion.

#### Stability

Stable at room temperature until expiration date.

#### Contains

NaOH 0,1%  
Detergent 1%

#### Warnings and Precautions


The Fast Detergent 1 is supplied concentrated, and must be diluted before use.


Use only distilled or deionized water.

Avoid bacterial contamination of water and liquid lines

Wear protective glasses and gloves when handling.  
In case of contact with eyes by mistake, wash the eyes with water immediately and consult with a physician.  
In case of drinking by mistake, take a large volume of water and consult with a physician.

#### The following symbols are used on labels

 For in vitro diagnostic use

 Use by (last day of the month)

 Temperature limitation

 Batch Code

 Code

### Alkalikus mosófolyadék a TMS automatákhoz

#### Kiszerezés

Egy flakon, 500 ml, 50x töménységű koncentrátum.

#### Felhasználás

Felhasználáshoz hígítsa ki 2%-osra.  
1000 ml készítéséhez adjon 20 ml Fast Detergent 1 koncentrátumot 980 ml desztillált vagy ioncserélt vízhez és óvatosan keverje össze.

#### Stabilitás

Szobahőmérsékleten a lejáratí ideig stabil.

#### Összetétel

NaOH 0,1%  
Detergent 1%

#### Figyelmeztetések

A Fast Detergent 1 koncentrátum, felhasználás előtt hígítani kell.


Csak desztillált vagy ioncserélt víz használható.

Kerülje a víz és a csövek bakteriális beszennyeződését.

Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.  
Ha a szembe kerül, mossa ki azonnal, vízzel a szemét és forduljon orvoshoz.  
Véletlen lenyelés esetén igyon nagy mennyiségű vizet és forduljon orvoshoz.

#### A címkén a következő szimbólumok találhatóak

 In vitro diagnosztikai használatra

 Lejáratí idő (a hónap utolsó napja)

 Tárolási hőmérséklet

 Gyártási szám

 Kódszám