


CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigén Gyorsteszt

Siemens Healthineers COVID-19 antigén gyorstesztje emberi orrból vagy orrgaratból vett mintákban jelen lévő COVID-19 vírusantigének kvalitatív kimutatására szolgál. A teszt működése a SARS-CoV-2 vírus nukleokapszid fehérjének felismerésén alapul.

A CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszt egy helyben használható kazettás teszt, amelynek alkalmazásához nincs szükség laboratóriumi eszközökre vagy szakképzett SARS-CoV-2 laboratóriumi személyzetre, mindössze 15 perc alatt eredményt ad.

Célja a SARS-CoV-2 fertőzés gyors diagnosztizálása a tünetek megjelenésétől számított tíz napig, illetve a tünetmentes egyének szűrése.

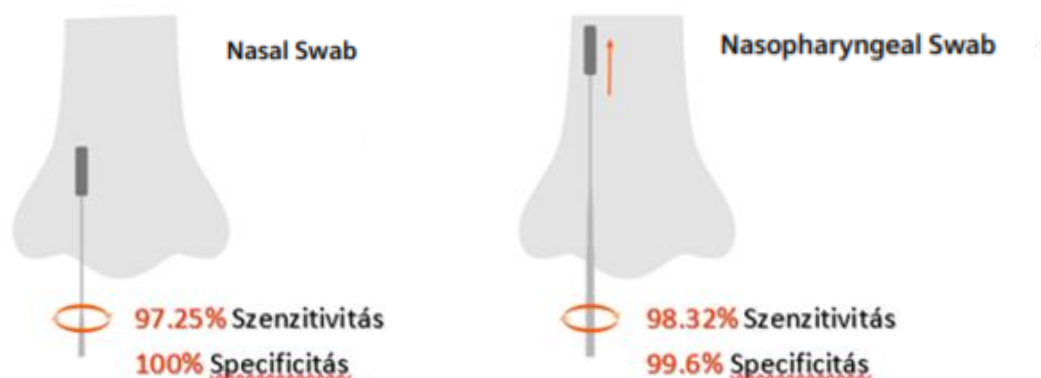

Módszer		PCR (Nasopharyngeális minta)		Összesített Eredmény
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigén Teszt (Nasopharyngeális minta)	Eredmények	Pozitív	Negatív	
	Pozitív	117	3	120
	Negatív	2	743	745
	Összesen	119	746	865

Relatív Szenszitivitás: 98.32% (95% CI:* 94.06% to 99.80%)

Relatív Szpecifitás: 99.60% (95% CI:* 98.83% to 99.92%)

Pontosság: 99.42% (95% CI:* 98.66% to 99.81%)

*Konfidencia intervallum

Módszer		PCR (Nasopharyngeális minta)		Összesített Eredmény
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigén Teszt (Nasalis minta)	Eredmények	Pozitív	Negatív	
	Pozitív	106	0	106
	Negatív	3	128	131
	Összesen	109	128	237

Relatív Szenszitivitás: 97.25% (95% CI:* 92.17% to 99.43%)

Relatív Szpecifitás: 100% (95% CI:* 97.16% to 100%)

Pontosság: 98.73% (95% CI:* 96.35% to 99.74%)

*Konfidencia intervallum

Az alábbi táblázatban a Siemens Healthineers COVID-19 antigén gyorseszteszt rendelési információit foglaltuk össze. Érdeklődés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a Diagnosticum Zrt. vevőszolgálatával vagy szakmai képviselőjével.

SMN szám	Referencia szám	Termék megnevezése	Kiszerezés
11555845	GCCOV-502a	CLINITEST SARS-CoV-2 Antigen Rapidtest	20 teszt
	Tesztcsomag tartalma:	Tesztkazetták	
		Extrakciós puffer	
		Steril mintavevő pálcák	
		Extrakciós csövek és zárókupakok	
		Munkaállomás	