

A kézenfekvő megoldás



HIV 1/2
VIKIA™

Magas diagnosztikai érzékenység
Gyorsteszt HIV fertőzés kimutatására


BIOMÉRIEUX

Gyorsteszt HIV elleni szérumellenanyagok humán szérumból, plazmából vagy teljes vérből történő kimutatására.



VIKIA HIV1/2
Ref.: 31112 (25 teszt)

Teljes vér

1. Vénpunkció vagy ujjbegyszúrás




2. 75 µl ujjbegyszúrásos vagy 3 csepp vénpunkciós teljes vér



3. 1 csepp puffer



4. leolvasás 30 perc elteltével

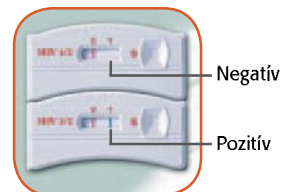


Szérum vagy plazma

2. 3 csepp szérum vagy plazma



4. leolvasás 30 perc elteltével

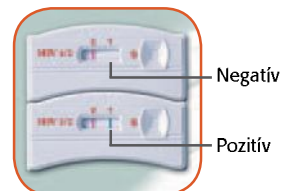

A VIKIA HIV 1/2 teszt immuno-kromatográfiás technikán alapuló gyors teszt HIV-1 és HIV-2 elleni szérumellenanyagok kvalitatív kimutatására humán szérumból, plazmából vagy teljes vérből.

A humán immunodeficiencia vírusok (HIV) RNS retrovírusok, melyek főleg parenterális, perinatális, transzplacentális úton vagy szexuális érintkezés révén terjednek.

2007-ben 2,5 millió ember fertőződött újonnan HIV vírussal. Becslések szerint 33,2 millió fertőzött ember él világszerte.

Teljesítmény

	SPECIFICITY (2100 samples)	SENSITIVITY (726 samples)
Plasma or Serum	99.71%	99.59%
Whole blood	99.95%	99.86%

Gyors és egyszerű használat

Eredmény 30 perc alatt.
Gyakorlatot nem igényel.
Bárhol használható.
Belső eljárási kontroll minden teszteszközben.

Tárolás 4-30 °C-on

A kit tartalma: 25 lezárt tasak
Mindegyik tasak tartalmaz:
1 teszteszközt, mintacseppentőt,
puffer cseppentőt a teljes vér mintákhoz.

bioMérieux S.A.
69280 Marcy l'Etoile
France
Tel.: (33) 04 78 87 20 00
Fax: (33) 04 78 87 20 90

bioMérieux Hungária Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.
Tel.: (36) 1 231-3050
Fax: (36) 1 231-3059

www.biomerieux.com

